

# Kezelési útmutató

## A szájmaszk és szűrőbetét mosása, fertőtlenítése




### A szájmaszk mosása, fertőtlenítése:



#### Mosás 40 fokon

Mosógépben 40 fokon vagy kézmeleg vízben, folyékony mosószerrel vagy mosogatószerrel.  
A mosogatószer zsíroló hatása miatt hatékonyan széttroncsolja a zsír lipid burkokat.

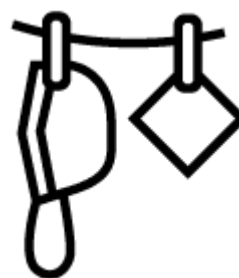

#### Szárítás normál hőfokon

Szárítógépben mosását nem javasoljuk.



## Fertőtleníthető

A fertőtlenítés plusz sterilizálást ad.



## Vasalás maximum 150 fokon

Vasalással sterilizálható. A szájmaszk gumi részét ne vasaljuk, így megőrzi tartósságát.


## A szűrőbetét mosása, fertőtlenítése:



## A szűrőbetét tisztítása:



**Kézi mosás**

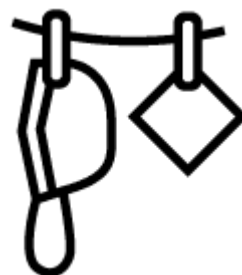

**Szárítás normál hőfokon**

Kézszeleg vízben, folyékony mosószerrel vagy mosogatószerrel. A mosogatószer zsíroldó hatása miatt hatékonyan szétroncsolja a zsír lipid burkokat.

Szárítógépben mosását nem javasoljuk.



## Fertőtleníthető

A fertőtlenítés plusz sterilizálást ad.



## Nem vasalható!

A hatékonyság megőrzése érdekében, ne vasaljuk!